





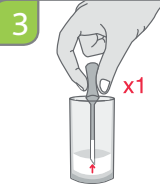
Schritt für Schritt Anleitung

1 


- ✓ Kuh-Nr. auf Teststreifen notieren
- ✓ 3 x Vorgemelk verwerfen
- ✓ Milchprobe in Sammelbehälter
→ Probe eines Viertels genügt

2 

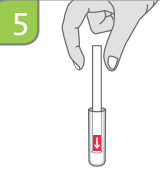
- ✓ Milchprobe gut schwenken
→ Gute Fettverteilung wichtig

3 

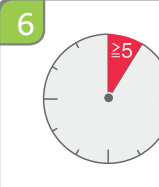
- ✓ Saubere Pipette verwenden
- ✓ Milchprobe vom Boden des Sammelbehälters entnehmen

4 

- ✓ Milchprobe in Teströhrchen aus dem Set füllen
→ Höhe maximal 7 mm

5 

- ✓ Teststreifen vorsichtig entnehmen
- ✓ Nummer / Datum auf weiße Fläche
- ✓ Stick in Milch tauchen
→ Pfeil nach unten
→ Rote Fläche **MUSS TROCKEN BLEIBEN!**

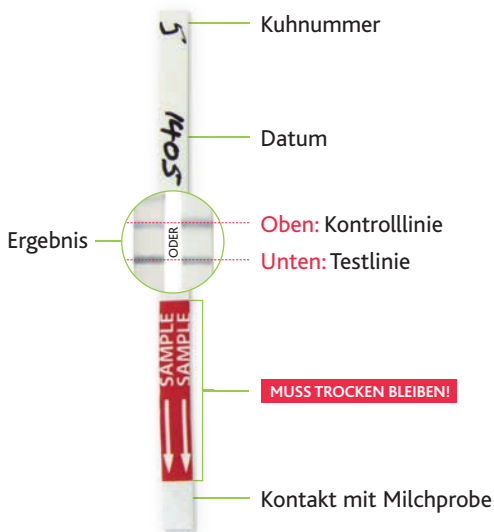
6 

- ✓ 5 Minuten warten
- ✓ Ergebnis ablesen
→ **Tipp:** Vor weißes Papier halten

Auswertung Ergebnis

Progesteron-Schnell-Test

Aufbau P4 Rapid Teststreifen



Interpretation P4 Rapid Testergebnisse



Testlinie **heller** als Kontrolllinie

- Hoher Progesteronspiegel
- Kuh ist nicht brünstig/ ggf. trächtig
- **Nicht besamen!**

Testlinie **dunkler** als Kontrolllinie oder gleich stark

- ✓ **Niedriger** Progesteronspiegel
- ✓ Kuh ist brünstig
- ✓ **Besamen!**

Merksatz: Unten im Dunkeln ist gut munkeln.