
ANLEITUNG

Tropffreie Messpipette



Anleitung zum korrekten Gebrauch der tropffreien Pipetten

Verwenden Sie die dem Set beigefügten speziellen Messpipetten, um jedem Röhrchen die genaue Menge von 100 µl Milch beizufügen. Stellen Sie sicher, dass für jede Probe eine neue und saubere Pipette verwendet wird.

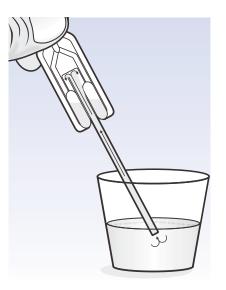



- 1 Drücken Sie einfach die Gummiblase zusammen.
- Tauchen Sie die Pipettenspitze in die Milchprobe und lassen Sie die Gummiblase sich ausdehnen.
- Dadurch entnimmt die Pipette genau die Menge von 100 μl Probeflüssigkeit (Milch).
- 4 Der Überschuss wird in die zwei Überlauftanks der Pipette abgesaugt und dort festgehalten.
- 5 Wenn Sie die Gummiblase erneut drücken, werden genau die 100 μl Milch abgegeben.
- Die überschüssige Milch in den Überlauftanks der Pipette bitte nicht mehr zusätzlich auf den Teststreifen geben!

Dieses einfache Instrument ermöglicht einen schnellen und genauen Testablauf ohne die Notwendigkeit der Verwendung einer volumetrischen Mikropipette oder die Abgabe der Milchprobe durch ein Zählen von Tropfen.

